

## INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW GENETYCZNE BADANIA WETERYNARYJNE

Centrum Badań DNA oferuje specjalnie zaprojektowany „ZESTAW DO POBIERANIA WYMAZÓW DO GENETYCZNYCH BADAŃ WETERYNARYJNYCH”, który jest przeznaczony do pobierania, a następnie bezpiecznego transportowania wymazów z jamy ustnej zwierzęcia. Pobrania wymazu należy dokonywać **wyłącznie za pomocą materiałów dostarczonych przez Centrum.**

**Skład zestawu do pobierania wymazów:**

- Sterylna pałeczka do pobierania wymazów z probówką Eppendorf – 1 szt.
- Rękawiczki lateksowe – 2 szt.
- Instrukcja pobierania wymazu – 1 szt.
- Formularz zlecenia badań weterynaryjnych – 1 szt.
- Koperta do zabezpieczania wymazów „Wipak Medical” – 1 szt.
- Wkład wysuszający – 1 szt.
- Druk przelewu za badanie – 1 szt.
- Koperta zwrotna zaadresowana na Centrum

### I. Przygotowanie do pobrania wymazu:

- Co najmniej **1 godzinę** przed pobraniem wymazu zwierzęciu nie należy podawać pokarmów, płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani przeprowadzać zabiegów higienicznych w okolicach pyska.
- Przed pobraniem wymazu w jamie ustnej zwierzęcia nie powinno być żadnych ciał obcych.
- Jeżeli wymaz pobierany jest od szczeniąt należy min. godzinę przed pobraniem oddzielić je od suki i pozostałych szczeniąt (np. umieszczając w transporterach) bez podścielania im, co zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia materiału do badania.

### II. Czynności w trakcie pobierania wymazu:


**Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach lateksowych, zmienianych po każdym pojedynczym pobraniu.**

1. Z uwagą otworzyć opakowanie i wyjąć zestaw zwracając uwagę by wymazówka pozostała wewnątrz probówki Eppendorf.
2. Opisać probówkę Eppendorf numerem kolejnego zwierzęcia. Ten sam numer wraz z danymi zwierzęcia (np. imię, numer identyfikacyjny, mikrochip, tatuaż itp.), datą i godziną pobrania wymazu należy umieścić na kopercie Wipak Medical.




**Uwaga! Koniec wymazówki nie może dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni poza zwierzęciem, od którego pobierany jest wymaz.**

3. Wyjąć wymazówkę z probówki Eppendorf. Probówkę odłożyć na czystą, sterylną powierzchnię.
4. Wymaz pobrać poprzez zdecydowane, **kilkukrotne** pocieranie końcem wymazówki wewnętrznej powierzchni jamy ustnej zwierzęcia.

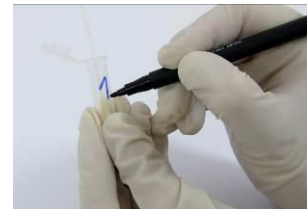


**Uwaga! Należy zwrócić uwagę aby zwierzę nie gryzło wymazówki. Na wymazówce znajduje się przewężenie w odległości ok. 2 cm od końca.**

5. Po pobraniu wymazu należy niezwłocznie umieścić wymazówkę w opisanej probówce Eppendorf, delikatnie jednym palcem przymknąć wieczko probówki i złamać wymazówkę w miejscu

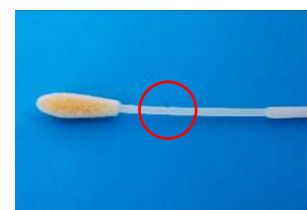

przewężenia. Po złamaniu wymazówki szczelnie zamknąć probówkę.

6. Zabezpieczoną wymazówkę w probówce Eppendorf należy następnie umieścić w opisanej kopercie „WipakMedical”. W przypadku zlecenia badań większej liczby osobników powyższą procedurę należy powtórzyć z pozostałymi wymazówkami. Każdą wymazówkę należy umieścić w oddzielnej kopercie.
7. Umieścić koperty „WipakMedical” z pobranymi uprzednio wymazami w kopercie zwrotnej.
8. Umieścić w kopercie wkład wysuszający.

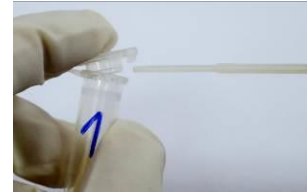

9. Wypełnić „**FORMULARZ ZLECENIA BADAŃ WETERYNARYJNYCH**”:
  - podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia informacje dot. zlecającego, właściciela, zwierzęcia, próbki etc.
  - wybrać zlecane badania genetyczne zaznaczając czytelnie odpowiednie pola (prosimy zapoznać się z załączonym do Zestawu cennikiem).
  - **uwaga: podpis osoby zlecającej jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań.**
10. Zabezpieczone w kopertach WipakMedical i opisane wymazówki, wkład wysuszający oraz wypełniony Formularz zlecenia badań genetycznych umieścić w zaadresowanej zwrotnie kopercie.

Materiał do badań proszę wysłać kurierem, ewentualnie Poczta Polska listem poleconym priorytetowym ( rekomendowane jest nadanie do godz. 15). Wysyłka powinna odbyć się tak aby materiał biologiczny przed weekendem dotarł do laboratorium.

Materiał Biologiczny proszę wysłać na adres:

Centrum Badań DNA

Ul. Mickiewicza 31

60-835 Poznań